

OCUflash®

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Popis produktu

OCUflash očné roztokové kvapky sú izotonický výplachový roztok s prídavkom extraktu očianky rostkovej. Očný roztok je naplnený vo viacdávkovej fľaške uzatvorenej uzáverom so závitom, označenej etiketou. Fľaška je balená do papierovej škatuľky spolu s návodom na používanie. 1 ml roztoku obsahuje 30 kvapiek.

Výplach očí

OCUflash očné roztokové kvapky sú očný roztok na výplach dráždivých častíc alebo chemikálií z oka. Bez rady lekára môže byť použitý na jednoduchý krátkodobý výplach, na kvapkanie do očí a na obklady očí.

Dezinfekčný účinok

Extrakt očianky rostkovej pôsobí v oku protizápalovo, dezinfekčne a adstringentne (sťahujúco). Tieto charakteristické vlastnosti očianky sa už dlhodobo využívajú k upokojeniu očí, na prevenciu a podpornú liečbu neinfekčných zápalov mihalníc a spojoviek. Prípravok je vhodné použiť pri odstraňovaní kozmetických prípravkov z okolia očí (viečok, rias).

Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Chlorid sodný 7 mg v 1 ml

Pomocné látky: benzalkónium-chlorid, edetan disodný, chlorid draselný, chlorid horečnatý, hexahydrát, polysorbát 80, očianková tinktúra, borax, hydroxid sodný, čistená voda.

Pomocná látka so známym účinkom: konzervačná prísada benzalkónium-chlorid 0,04 mg v 1 ml (0,004 %), očianková tinktúra 2,0 mg v 1 ml (0,2 %).

Účel určenia prípravku

OCUflash očné roztokové kvapky sú určené na vypláchnutie dráždivých častíc, chemikálií a cudzích teliesok z oka, na vyplachovanie oka v prípade poranenia oka a na kvapkanie do oka pri vystavení vplyvom prostredia (napr. znečistenie, práca s počítačom, klimatizácia), na prevenciu a doplnkovú symptomatickú liečbu neinfekčných zápalov očných viečok, spojoviek a chronických infekcií spojoviek.

Indikácie

Špecifické indikácie pre OCUflash očné roztokové kvapky sú:

1. výplach oka po tonometrii a gonioskopii
2. výplach oka po nosení tvrdých kontaktných šošoviek
3. výplach oka, odstránenie cudzích teliesok, prachu a chlóranej vody
4. odplavenie zvyškov fluoresceínových roztokov
5. vymývanie hlienových a hnisavých sekrétov
6. ako prvá pomoc po ľahkom poleptaní spojoviek a očí kyselinami a zásadami (vápnom, maltou), poranenia oka
7. ako podporný prostriedok pri niektorých, hlavne neinfekčných zápaloch spojoviek, chronických zápaloch spojoviek.

Populácia pacientov a určenie používateľa

OCUflash očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Obmedzenia

Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa pohlavia, veku a/alebo hmotnosti používateľa. Vzhľadom na bezpečnosť prípravku, je možné ho podávať aj novorodencom, dojčatám, tehotným ženám a dojčiacim matkám.

Dávkovanie

Výplach

Pri výplachu akéhokoľvek cudzieho telieska z oka aplikujte roztok až do doby odstránenia cudzorodej látky či cudzích teliesok, prípadne do vymiznutia ťažkostí.

Neinfekčný zápal spojoviek

Kvapajte 1-2 kvapky do dolného spojovkového vaku 1 až 4-krát denne.

Poučenie pred aplikáciou

OCUflash očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľašku hore dnom a jej stlačením kvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Množstvo aplikovaného roztoku závisí od spôsobu použitia. Pri zápaloch očných viečok je možné roztok použiť i na obklady očí.

Kontraindikácie

OCUflash očné roztokové kvapky sa nesmú používať pri precitlivenosti na niektorú z ich zložiek.



Varovania

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok alebo konzervačnú látku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 28 dní.

- uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.



Upozornenia

Nositelia kontaktných šošoviek

Tento prípravok obsahuje konzervačnú látku benzalkónium-chlorid. Mäkké kontaktné šošovky môžu reagovať s benzalkónium-chloridom a môže sa zmeniť farba kontaktných šošoviek. Pred použitím prípravku si vyberte kontaktné šošovky z očí a po aplikácii počkajte 15 minút, kým vložíte kontaktné šošovky späť.

Iné súčasne používané očné prípravky

Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi jednotlivými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedzte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť nevráti opäť do normálneho stavu.

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah jednej fľašky by mala používať iba jedna osoba.

Nežiaduce vedľajšie účinky

OCUflash očné roztokové kvapky sú veľmi dobre znášané. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejavíť ako mierna vyrážka, exfoliatívna dermatitída (začervenanie a odlupovanie kože na veľkých častiach tela) alebo multiformný erytém (vyrážky rôznych foriem, ako napríklad červené flaky, vyvýšené pupienky alebo pľuzgiere)
- epitelové zmeny, poškodenie očí
- hyperémia (začervenanie)
- slzenie
- lokálne podráždenie (pálenie, svrbenie, štipanie, mierny nepríjemný pocit)

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s používaným prípravkom je potrebné nahlásiť výrobcovi (neziadu@unimedpharma.sk) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

Interakcie nie sú doposiaľ známe.

Klinický prínos

OCUflash očné roztokové kvapky pomáhajú predchádzať podráždeniu, poškodeniu oka, zápalu alebo infekcii oka odplavením kontaminovaných častíc, ako sú cudzie telieska, prach, roztok fluoresceínu alebo hlienové a hnisavé sekréty z povrchu oka, ktoré by inak mohli poškodiť oko a/alebo spôsobiť zápal alebo infekciu a zhoršenie stavu. OCUflash očné roztokové kvapky možno použiť aj ako doplnkovú symptomatickú liečbu neinfekčných zápalov očných viečok, spojoviek a chronických infekcií spojoviek.

Pokyny na skladovanie a likvidáciu produktu

Uchovávať pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Obsah balenia:

Polyetylénová (LDPE) fľaška s LDPE kvapkadlom, biely polypropylénový (PP) uzáver so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml

Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívať ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie.
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025

CE 2265